

10분 이내 결과 확인 | 고민감도(낮은 검출 한계) | Competitive 방식

본 제품을 사용하기 전에 반드시 설명서를 숙지하시고 사용하기 바랍니다.

BAROS-N6 6종 마약류 동시 검사키트는 의심되는 미지시료(물, 주류, 음료, 음식등)에서 6가지 마약 및 항정신성의약품의 동시검사를 위한 키트입니다. 본 검사키트는 마약류의 주요 성분에 해당하는 특이항체를 사용하여 검출 감도가 뛰어나고 쉽고 편하게 사용할 수 있고 10분 이내에 정확한 결과를 확인할 수 있습니다.

구성품



검사용 디바이스



버퍼용기 & 필터캡



일회용 멸균 면봉




사용설명서

BAROS-N6 사용 가이드

<p>1 동봉된 면봉을 꺼내 의심되는 분말, 액체류, 음식 등에 일회용 면봉을 이용하여 검체를 채취합니다.</p>	<p>2 시료가 묻은 면봉을 버퍼용기에 넣고 잘 섞은 후 버퍼용기의 양 옆을 눌러 면봉을 짜내듯이 꺼냅니다.</p>	<p>3 버퍼용기 상부에 노출필터캡을 결합시키고 꼭 눌러 줍니다.</p>	<p>4 카세트 S(Sample) 주입구에 용액을 3~4 방울 떨어뜨립니다.</p>	<p>5 약 10분 후 테스트 결과를 확인할 수 있습니다.</p>

검사결과 판독

BAROS-N6 검사결과는 아래와 같이 판독하시면 됩니다. 대조점(C)과 검사점(1, 2, 3, 4, 5, 6)으로 구성되어 있으며 각 타겟 마약 유무에 따라 아래와 같이 판독합니다.

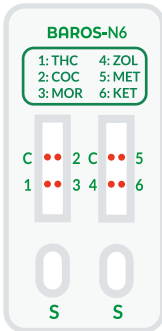

<p><b>THC 양성</b></p>	<p><b>ZOL 양성</b></p>
<p><b>COC 양성</b></p>	<p><b>MET 양성</b></p>
<p><b>MOR 양성</b></p>	<p><b>KET 양성</b></p>

대조점이 발생되지 않은 경우 테스트가 정상적으로 이뤄지지 않은 경우로 재검사가 필요합니다.

**재검사**

\* 30분 이후의 결과는 신뢰하지 않습니다.

주의사항



- 본 제품을 마약물질 검사 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.
- 소아나 유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 사용 시 사용기간, 파손 및 변질 여부를 확인하시고 사용하십시오.
- 평평한 곳에 카세트를 놓고 검사를 진행하시고, 버퍼용기를 수직으로 잡고 천천히 떨어뜨리십시오.
- 30분 이후에 나온 결과는 신뢰할 수 없습니다.
- 밝은 곳에서 검사용 디바이스를 가까이 보고 결과를 확인하십시오.
- 색 구분에 어려움이 있거나 시력이 낮은 사람은 결과 확인이 어려울 수 있습니다.